

Merianto Medicalin sairaalakalusteiden käyttö- ja huolto-ohje

Mitä tulee huomioida kalusteiden käytössä?

Merianto Medical -sairaalakalusteet on suunniteltu kohdennettuun käyttöön normaaleissa sisäolosuhteissa. Kalusteita tulee säilyttää ja käyttää kuivissa lämmitettävissä tiloissa, joissa ilman lämpötila on yli +10°C ja suhteellinen ilmankosteus 40-60 %.

Suosittelavaa on suojata kalusteet suoralta auringonvalolta, joka voi muuttaa tuotteiden väriä ja ulkonäköä: viimeistellyt pinnat haalistuvat ja samentuvat, lakatut pinnat voivat haljeta. Eniten ja nopeimmin auringon säteily vaikuttaa luonnolliseen puuhun ja viilutettuihin pintoihin.

Tuotteiden hyllyjä, ovia, laatikoita ja työpintoja ei saa ylikuormittaa painavilla esineillä. Oviin ei myöskään saa kiinnittää täydentäviä osia tai lisäkuormitusta, joita ei ole huomioitu tuotteen suunnittelussa. Kaapinovie saranoiden ja laatikoiden vääntymisen välttämiseksi kalusteiden ovet ja laatikot tulee pitää suljettuina.

Kuumien esineiden asettaminen kalusteille voi pilata tuotteen pinnan, suositeltavaa on käyttää sopivia pannunalusia.

Teräväreunaiset esineet ja metalliesineet voivat vahingoittaa kalusteen pintaa.

Kalusteisiin joutunut neste tulee kuivata välittömästi puhtaalla pehmeällä liinalla.

Jos kalusteen rakenteessa on näkyvissä vetimiä, pultteja tai ruuveja, ne tulee tarkastaa silloin tällöin. Tuotteesta ja käyttöärasituksesta riippuen tarkastus tulee suorittaa 2-4 vuoden välein. Tarvittaessa tulee ottaa yhteyttä Merianton asiakaspalveluun.

Erikoiskalustoa siirrettäessä on suositeltavaa käyttää asiantuntijoiden apua tai kysyä tarvittaessa neuvoa valmistajalta. Seiniin kiinnitettävien kaappien tapauksessa tulee ehdottomasti noudattaa valmistajan asennusohjeita. Asennustöitä tehdessä ei saa unohtaa turvallisuusvaatimuksia.

Kalusteita siirrettäessä tuotteista tulee irrottaa liikkuvat osat – laatikot, ovet, sisähyllyt, lisävarusteet ja pakata kaikki erikseen huolellisesti osien mahdollisen vahingoittumisen välttämiseksi.

Miten kalusteita huolletaan?

Kalusteiden valmistuksessa on käytetty lähinnä kestäviä ja helposti huollettavia materiaaleja. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavia ainesosia, valkaisevia ja liuottimia sisältäviä puhdistusaineita. Puhdistusmateriaalien valinnassa tulee noudattaa pakkauksessa olevia käyttöohjeita.

Kaappien rungot on valmistettu laadukkaasta melamiinista, joka puhdistetaan vesiliukoisilla puhdistusaineilla. Puhdistukseen sopii neutraali astianpesuaine (pH6-8) tai miedosti emäksinen puhdistusaine (pH 8-10) veteen annosteltuna. Emäksistä puhdistusainetta käyttäessä pinnat tulee pyyhkiä vielä kostealla liinalla.

Maalatut ja lakatut pinnat puhdistetaan kuten kaappien rungot astianpesuaineliuoksessa (pH 6-8) kostutetulla liinalla.

Laminaattipinnat kestävät mekaanista kulutusta, suurinta osaa kalusteiden puhdistusaineista ja myös heikkojen happojen vaikutusta. Korkein sallittu lämpötila tilapäisessä kosketuksessa laminoidun pinnan kanssa on +180 C°. Vaikeiden tahrojen poistamiseen voi käyttää talousspriissä, asetonissa tai liuottimessa kostutettua puhdistusliinaa. Pintojen hankaaminen puhdistuksessa ei ole suositeltavaa. Voimakkaiden aineiden kuten veri, bakteriologinen pilaantuminen, maalit, öljyt, liuottimet, lakat, liima, tahmeat aineet jne. poistamiseen laminaattipinnasta voi käyttää vahvempia orgaanisia puhdistusaineita kuten asetonin, bensiiniä, sprii. Hankaus- ja kiillotusaineita, vahoja sekä puhdistusaineita, jotka sisältävät happoja tai happamia suoloja (sulfamiinihappo, hydrokloridihappo, hopeankiillotusaine) tulee välttää. Vahvempien puhdistusaineiden käyttöä tulee välttää työta-son PVC- tai puureunojen puhdistuksessa.

Komposiittimateriaalipinnat (Kerrock, Corian, Durat, HiMacs jne.) on tarkoitettu sisäkäyttöön. Tuotteen pinta on kiillotettu ja melko kestävä erilaisten aineiden, nesteiden jne. aiheuttamien tahrojen muodostumisen suhteen. Happamien aineiden ja öljyjen joutuessa työtasoon puhdistane pehmeällä kostealla liinalla 4 tunnin kuluessa. Tuotteen huolto: puhdistetaan pehmeällä ja kostealla liinalla, voi käyttää erilaisia neutraaleja puhdistusaineita. Pienemmät mekaaniset pintavauriot voi poistaa pinnan kiillotuksella, joka on järkevää tehdä pinnan käyttöaktiivisuudesta riippuen 2-3 vuoden välein.

Lasiovien ja -pintojen puhdistukseen on parasta käyttää ikkunanpesuainetta ja ikkunanpesussa käytettävää puhdistusliinaa. Hankaavia puhdistusaineita, jotka voivat samentaa lasipintaa, tulee välttää. Kaikki kalusteissa käytettävä lasi on karkaistua suojalasia.

Jauhemaalattuja teräs- ja alumiinikoreja, -kehyksiä, -varusteita ei periaatteessa tarvitse huoltaa, tarvittaessa ne puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella ja -liinalla. Staattisen sähköön muodostumisen välttämiseksi pintoja voi käsitellä antistaattisella aineella. Ei saa käyttää hankaavia puhdistusaineita, liuottimia, asetonia.

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet ovat erittäin kestäviä ja tarvitsevat vähän huoltoa. Ruostumattomat pinnat puhdistetaan neutraalilla tai miedosti emäksisellä pesuaineella. Pinnan puhdistamisen jälkeen pinnat kuivataan pyyhkimällä. Puhdistukseen voi käyttää esimerkiksi myös lasinpesuainetta, joka poistaa rasvaisen lian ja kuivuu nopeasti, jättämättä pisaroita. Pienemmät pintavahingot voi poistaa ruostumattoman materiaalin pinnalta kiillotustahnojen avulla (kysy täydentävää tietoa Merianton edustajalta).

Ovisaranat ovat 220 astetta avautuvat ja kolmeen suuntaan säädettävät metalliset piilosaranat. Saranoita ei tarvitse huoltaa ja ne on helppo pitää puhtaana. Käyttöärasituksen mukaan saranat voivat tarvita silloin tällöin säätämistä, mikä on helppo tehdä kiinnityslevyssä olevista säätöruuveista kiertämällä niitä tarvittavaan suuntaan. Ota tarvittaessa yhteyttä Merianton asiakaspalveluun.

Muoviset sivupaneelit kestävät enintään 20 kg:n painon koria kohti. Sivupaneeleita ei tarvitse huoltaa. Puhdistamiseen sopii neutraali astianpesuaine (pH6-8) tai miedosti emäksinen puhdistusaine (pH 8-10) veteen annosteltuna. Emäksistä puhdistusainetta käyttäessä pinnat tulee pyyhkiä vielä kostealla liinalla. Sivupaneelien puhdistukseen on suositeltavaa käyttää erityistä harjaa, joka helpottaa paneelien urien puhdistamista (harjan tilaamiseksi ota yhteyttä Merianton edustajaan).

Kuulalaakereilla olevat teleskooppikiskot kestävät enintään 50 kg:n painon yhtä kiskoparia kohti. Pyyhi tarvittaessa kiskot kuivalla liinalla. Käyttöiheydestä riippuen kiskot saattavat tarvita kevyttä voitelua.

Muoviset korit ja väljakajat ovat kestävästä muovia, luotu suurta käyttöärasitusta ja tiheää puhdistusta vaativiin paikkoihin.

PC-korit (polycarbonate) ovat suurta mekaanista rasitusta kestäviä konepestäviä tuotteita, jotka kestävä enintään +125 C°:n pesulämpötilan, lyhytaikaisesti enintään +140 C°:n lämpötilan. Kestävät öljyjä ja rasvoja. Hapot ja alkaliset aineet voivat pilata tuotteen pinnan.

ABS-korit (Acrylnitrile-butadiene-styrene) ovat jäykkiä ja vahvoja, kestävät vakautettuna suurta käyttöärasitusta. Kestävä enintään +70 C°:n pesulämpötilaa, lyhytaikaisesti enintään +90 C°:n pesulämpötilaa. Kestävä heikkoja happoja ja alkalisia aineita.

Huomio! Huolto-ohjeessa mainittujen materiaalien ominaisuudet ja huolto-ohjeet on saatu materiaalien toimittajiltamme. Tuotteiden huollon tulee ehdottomasti perustua esitettyihin vaatimuksiin ja niitä tulee noudattaa. Merianto ei vastaa materiaalien ja tuotteiden väärinkäytöstä tai puutteellisesta huollosta mahdollisesti aiheutuvista seurauksista. Kysy tarvittaessa täydentävää tietoa Merianton edustajalta.