

Pyörätuoliluiskat



FINNRASTI



Pyörätuoliluiskat

Weland valmistaa tukevia, turvallisia ja helposti asennettavia pyörätuoliluiskia. Luiskia on saatavana sekä teräksestä että alumiinista valmistettuna.



Ritiläluiskat

Weland pyörätuoliluiska koostuu ritilästä, jonka Silmäkoko on k/k 17 x 75 mm sekä sivupalkeista, kaiteista ja tukijaloista. Luiska toimitetaan helposti asennettavina osina.

Vakio pintakäsittely on kuuma-sinkitys.

Vakiomodulit

Vakiomoduuleja on varastosta 1500 mm:stä ylöspäin 500 mm välein. Moduuleja on kahta levyttä, 900 tai 1300 mm. Luiskien kaltevuus on säädettävissä, mutta saa olla enintään 1:12. Jos luiskan pituus on yli 6 metriä, se pitää varustaa lepotasolla.

Sivupalkit ja kaide

Sivupalkit valmistetaan 150 x 60 x 5 mm:n L-profiilista varustettuna kaiteella tai ilman kaiteita.

Kaiteen käsijohde on Ø 42 mm:n ruostumatonta putkea ja kaide-tolppa U-profiilia, korkeus 900 mm.

Käsijohde

Jos luiska kulkee seinän viertä, voidaan siihen asentaa toiselle sivulle kaide ja toiselle sivulle pulteilla seinään kiinnitettävä käsijohde. Käsijohde on Ø 42 mm:n putkea ja varustettu kiinnityskorvakkein.

Ritilä

Luiska koostuu ritilätasoista, tyyppi N6 25/2, jonka silmäkoko on k/k 17x75 mm. Tason mitta on 890 tai 1290 mm. Alin taso varustetaan viistoreunalla. Vakio tason ritilöiden mitat ovat 1100 x 1100, 1500 x 500 ja 1500 x 1000 mm.

Tukijalat

Tukijalat on asennettava kolmen metrin välein. Ne ovat Ø 42 mm:n teräsputkea. Jalan alapäähän, putken sisään on puristettu kierreinen holkki johon jalkalaatan päälle hitsattu kierteitetty putki sopii. Säästövara on 30 – 100 mm. Tukijalkoja valmistetaan 350, 600 ja 100 mm:n mittaisina.

Ne katkaistaan tarkkaan mittansa asennuksen yhteydessä.

Kulmateräs, jatkoliitos

Luiska kiinnitetään seinään pulteilla ja 115 x 50 x 300 mm:n kulmateräksellä. Jatkoliitosta käytetään luiska ja tason välissä, mitat 115 x 50 x 220 mm.


Molemmat kiinnitysosat soveltuvat käytettäväksi niin oikealla kuin vasemmallekin puolelle.

Lapsiturvallinen kaide

Welandin pyörätuoliluiskiinkin on saatavana myös lapsiturvallinen kaide, jossa aukon koko on enintään 100 mm. Kaide voidaan asentaa luiskan yhdelle tai molemmille sivuille.

Pintakäsittely

Luiska on kuuma-sinkitty, paitsi käsijohde, joka on ruostumatonta terästä.

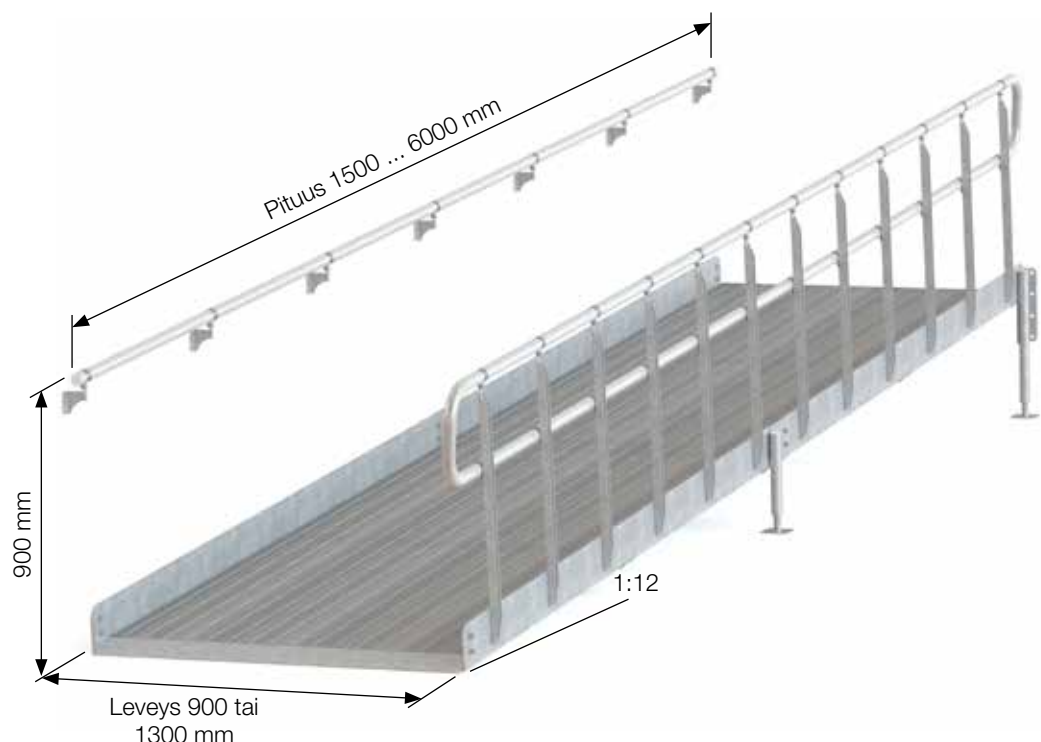



Täydelliset pyörätuoliluiskat

Täydelliset pyörätuoliluiskat muotoillaan tarpeittesi ja toiveittesi mukaisesti. Tässä on muutama esimerkki kaiteiden sijoittelusta. Welandin valmistaa pyörätuoliluiskia taulukon mukaisissa vakio mitoissa.

Täydellisten luiskien vakio mitat

Mitat (mm) Leveys x pituus	Mitat (mm) Leveys x pituus
900 x 1500	1300 x 1500
900 x 2000	1300 x 2000
900 x 2500	1300 x 2500
900 x 3000	1300 x 3000
900 x 3500	1300 x 3500
900 x 4000	1300 x 4000
900 x 4500	1300 x 4500
900 x 5000	1300 x 5000
900 x 5500	1300 x 5500
900 x 6000	1300 x 6000

Kaide molemmin puolin



Kaide toisella puolella



Kaide toisella, käsijohde toisella puolella





Käsijohde molemmin puolin



Ilman kaiteita



Lapsiturvallinen kaide

Lapsiturvallinen kaide, jossa tolppien välinen aukko on enintään 100 mm. Kaide voidaan asentaa luiskin yhdelle tai molemmille sivuille.




Pyörätuoliluiskien lisävarusteet


Luiskat ovat kehittyneet ja vaatimukset ovat muuttuneet. Nykyään pyörätuoliluiskamme voidaan varustaa mm. kontrastimerkinnöillä, 30 cm luiskin ulkopuolelle ulottuvalla kaiteella sekä käsijohteen ja tolppien välisillä väliskeillä.

Luiskat voidaan varustaa lapsiturvallisella kaiteella turvallisuuden lisäämiseksi.

Käsijohteen välike

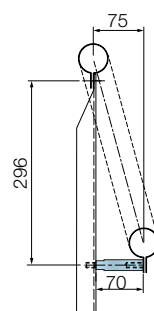

Pidennetty käsijohde

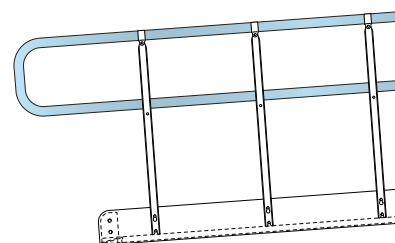

Yleisiä ohjeita koskien pyörätuoliluiskia

Yhteenveto Boverketin rakentamismääräyksistä, BBR 3:122, 3:123, 8:2321 ja Bygg ikapp Handikapp (BBR:n lisäosa)

Sisäänkäynti rakennukseen

Vähintään yhden sisäänkäynnin on oltava sellainen, että sitä voi käyttää henkilöt, joiden liikkumis- tai suunnistautumiskyky on vajavainen.

Yleinen ohje.

Kulkutien tulee: Olla vaakasuora tai se saa viettää enintään 1:12 lepotasojen välillä. Korkeusero saa olla korkeintaan 0,5 m lepotasojen välillä. Oltava vähintään 1,3 m leveä. Tietyissä tapauksissa ka-peampi luiska voidaan hyväksyä.

Aulat ja kokoontumistilat

Luiskat saavat olla korkeintaan 1:12 kaltevia ja korkeusero saa olla korkeintaan 0,5 m kahden, vähintään 2 metriä pitkän lepotason välillä.


Koska määräysten mukainen luiska on korkeintaan 0,5 m voi 1:12 viettävä luiska olla max. 6 metriä pitkä 0,5 metriä suurempi korkeus jaetaan kahden luiskan kesken välitasolla.

Kaide ja käsijohde

Luiskat jotka eivät rajoitu seiniin varustetaan kaiteilla. Yli 0,5 m korkeat luiskat varustetaan kaiteilla molemmin puolin.





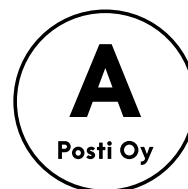

Posti Green



OY Finnraști AB, Peltotie 31, 28400 ULVILA



***Lisätietoa tuotteistamme löydät
kotisivuiltamme :
www.finnrasti.fi tai www.weland.se***



Myynti ja varastot:

OY Finnraști AB
Peltotie 31
28400 ULVILA

Puhelin: 02-634 39 00
Telefax: 02-634 39 39

Sähköposti: info@finnrasti.fi
Kotisivut: www.finnrasti.fi

Myynti / Etelä-Suomi:

OY Finnraști AB
Kärbyntie 52
10160 Degerby

Puh: 044-030 20 44